

Τα εργαλεία της BS-DENTAL, BSORTHO Royal Orthodontics κατασκευάζονται στην Ε.Ε. από την μεγαλύτερη κατασκευαστρια ιατρικών & οδοντιατρικών εργαλείων στον κόσμο. Όλα τα εργαλεία είναι κατασκευασμένα από την καλύτερη ποιότητα χειρουργικό ανοξείδωτο χάλυβα και σύμφωνα με όλα τα διεθνή στάνταρντ ποιότητας ISO 9001 : 2008, ISO 13485 : 2003, FDA, JPAL -BG 12400023, KFDA & CE MARKING. Μπορούν να αποστειρωθούν σε αυτόκαυστο κλίβανο καθημερινά χωρίς να χάσουν το παραμικρό από τις εξαιρετικές τους ικανότητες. Διαθέτουν 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας. Τα τελευταία δέκα χρόνια που διατίθενται στην ελληνική αγορά έχουν γίνει η Νο. 1 επιλογή των Ορθοδοντικών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά τη χρήση ξεπλύνετε τα εργαλεία με ζεστό (όχι καυτό νερό) για να απομακρύνετε όλα τα ορατά υπολείμματα. Στη συνέχεια μπορούν να καθαριστούν στο μηχάνημα υπερήχων. Πριν από την αποστείρωση σε αυτόκαυστο κλίβανο τα εργαλεία που έχουν κλειδώσεις θα πρέπει να λιπαίνονται όχι με βιομηχανικά λιπαντικά αλλά με ειδικά οδοντιατρικά λιπαντικά (συμπλητείται το JG600 της Aescular). Τα εργαλεία προς αποστείρωση θα πρέπει να πακετάρονται σε σακουλάκια ή σε ανοξείδωτα σετ και πάντα ανοικτά αλλιώς μπορεί να δημιουργηθούν στίγματα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Θερμοκρασία πάνω από 180°C μπορεί να καταστρέψει τα εργαλεία.

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



Κόφτης οπισθίου άκρου σύρματος. Κόβει και συγκρατεί όλα τα σύρματα μέχρι 0,022" x 0,028" εξαιτίας του ενισχυμένου κοπτικού άκρου TC από βολφράμιο σε σχήμα Z!
Σε δύο μεγέθη κανονικό 13mm Code DCR KO-908-130 και με μακρύ χερούλι 15mm Code DCRL KO-918-150



Κόφτης οπισθίου άκρου σύρματος Flush Cut. Κόβει χωρίς να αφήνει υπόλοιπο και συγκρατεί όλα τα σύρματα μέχρι 0,022" x 0,028" εξαιτίας του ενισχυμένου κοπτικού άκρου TC από βολφράμιο
Σε δύο τύπους, Α για λεπτά και Β για χοντρά σύρματα
CODE: DCNFC KO-902-909



Κόφτης οπισθίου άκρου σύρματος. Κόβει αφήνοντας επαρκές μήκος 4mm σύρματος για να μπορεί να κομφωθεί από τον ορθοδοντικό άνω των γαμφιών ! Για σύρματα μέχρι 0,022" x 0,028".
Code DCW & KO-905-130



Κόφτης σύρματος με 15μοίρες γωνία. Κόβει όλα τα σύρματα μέχρι 0,022" x 0,028" ή μέχρι 0,5mm εξαιτίας του ενισχυμένου κοπτικού άκρου TC από βολφράμιο. Code LWCA & KP-909-130



Κόφτης συρμάτων προσδέσεων ευθύς μακρής. Κόβει τέλεια όλες τις συρμάτινες προσδέσεις και σύρματα μέχρι 0,016" ή μέχρι 0,3mm εξαιτίας του ενισχυμένου κοπτικού άκρου TC από βολφράμιο. Code LCSFLTC & KO-910-130



Κόφτης συρμάτων προσδέσεων ευθύς κοντής. Κόβει τέλεια όλες τις συρμάτινες προσδέσεις και σύρματα μέχρι 0,016" ή μέχρι 0,3mm εξαιτίας του ενισχυμένου κοπτικού άκρου TC από βολφράμιο. Code LCSFSTC & KP-964-000 & LCSFS KP-064-130-PMK



Κόφτης σύρματος ευθύς. Κόβει όλα τα σύρματα μέχρι 0,022" x 0,028" ή μέχρι 0,6mm εξαιτίας του ενισχυμένου κοπτικού άκρου TC από βολφράμιο. Code LWCSN & KP-901-130



Κόφτης σύρματος ευθύς φαρδύς. Κόβει όλα τα σύρματα μέχρι 0,022" x 0,028" ή μέχρι 0,6mm εξαιτίας του ενισχυμένου κοπτικού άκρου TC από βολφράμιο. Code LWCSW & KO-911-130



Βελονοκότοχο ευθύ πολύ λεπτό τύπου Mathieu με ειδική υποδοχή στο άκρο του για τις ελαστικές προσδέσεις. Code MASFH KO-003-135-PMK

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΙΜΗ



Βελονοκότοχο ευθύ πολύ λεπτό τύπου Mathieu για τις ελαστικές προσδέσεις.
Code MASF KO-001-140-PMK



Βελονοκότοχο καμπύλο πολύ λεπτό τύπου Mathieu για τις ελαστικές προσδέσεις. Το ιδανικό εργαλείο για την γλωσσική τεχνική.
Code MACF KO-001-140-ZMK



Βελονοκότοχο ευθύ πολύ λεπτό τύπου Mosquito για τις ελαστικές προσδέσεις.
Code MOSFM KN-321-120-PMK (KN-320-120-PMK)



Πένσα συγκράτησης σύρματος τύπου Weingard. Διατίθεται και με ενισχυμένα άκρα βολφραμίου.
Code WEIN KP-504-145-PMK



Πένσα συγκράτησης σύρματος τύπου Weingard λεπτή.
Code: WEINF KP-503-145-PMK



Πένσα συγκράτησης σύρματος τύπου Weingard German Style
Code: WEING KP-039-140-HPMK
WEINGTC KP - 939-140-HPZMK



Ανταλλακτικό προστατευτικό για το άκρο των λαβίδων αφαίρεσης δακτύλων. Κλιβανιζόμενο μέχρι 180°C.
Code HAT



Πένσα αφαίρεσης δακτύλων ευθεία με προστατευτικό. Σε δύο τύπους
A: αριστερά με μακρύ σκέλος. Code DBH KO-348-140-PMK
B: δεξιά με κοντό σκέλος. Code DBHS KO-248-140-PMK



Πένσα αφαίρεσης δακτύλων καμπύλη με προστατευτικό. Ο πατενταρισμένος σχεδιασμός της διευκολύνει την αφαίρεση των δακτύλων ακόμη και στα πιο μικρά στόματα.
Σε δύο τύπους
A: αριστερή. Code DBHL LEFT KO-349-140-LHMK
B: δεξιά Code DBHR RIGHT KO-349-000-RHMK



Πένσα αφαίρεσης δακτύλων & κονίας ευθεία με προστατευτικό. Με ειδική καμπυλότητα στα σκέλη της για να αφαιρεί τις περισσειές της κονίας χωρίς να καταστρέφει το δόντι.
Code DBHG KO-946-000-HPZMK



Πένσα αφαίρεσης δακτύλων ευθεία χωρίς προστατευτικό. Σε δύο τύπους
A: αριστερά με μακρύ σκέλος. Code DBL KO-347-140-PB
B: δεξιά με κοντό σκέλος. Code DBS KO-247-140-PT



Πένσα αφαίρεσης αγκίστρων ευθεία. Αφαιρεί τα τόσο τα μεταλλικά όσο και τα κεραμικά μπράκετ εύκολα. Code: DBRS KP-013-135-PMK
Πένσα αφαίρεσης αγκίστρων κεκομμένη. Αφαιρεί τα τόσο τα μεταλλικά όσο και τα κεραμικά μπράκετ εύκολα. Η ιδανική πένσα αφαίρεσης των σωληνίσκων αλλά και των γλωσσικών αγκίστρων.
Code: DBRC KP-013-135-ZMK



Πένσα αφαίρεσης ζαφειρέων και κεραμικών αγκίστρων κεκομμένη. Αφαιρεί εύκολα τα μπράκετ χωρίς να τα καταστρέφει. Προσοχή τα άγκιστρα πρέπει να αφαιρούνται με το σύρμα και τις ελαστικές προσδέσεις.
Code: MISO

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΙΜΗ



Πένσα συγκράτησης σύρματος τύπου How
Αριστερή φωτο ευθεία.
Code HOWS KO-083-145-HPT
Δεξιά φωτο κεκαμμένη ιδανική για την γλωσσική
τεχνική.
Code HOWC, KO-083-145-HTP



CRIMPABLE HOOK
Πένσα τοποθέτησης των αγκίστρων
CRIMPABLE HOOK στο σύρμα
KO-957-130-PZMK



Πένσα διαμόρφωσης καμπυλότητας δακτυλίων και
στεφανών με λεπτά και κανονικά άκρα. Code BDFO,
KP-205-135-PMK
Code BDFOS, KP-205-135-PMK



Πένσα διαμόρφωσης/κάμψης σύρματος τύπου 139 Μακρυά
(με ένα πυραμιδικό και ένα κωνικό άκρο) σε δύο τύπους
Κανονικό που κάμπτει σύρμα μέχρι 0,5mm.
Code: 139L KP-086-125-PT
Και TC ενισχυμένο για σύρμα μέχρι 0,9mm.
Code 139TC, KO-986-125-PZMK



Πένσα διαμόρφωσης/κάμψης σύρματος
Τύπου 139 Κοντή (με ένα πυραμιδικό και ένα
κωνικό άκρο)
Κάμπτει σύρμα μέχρι 0,7 mm.
Code 139S, KP-047-125-PMK



Πένσα διαμόρφωσης/κάμψης σύρματος
Τύπου 139 με χαραγές/υποδοχές σύρματος (με
ένα πυραμιδικό και ένα κωνικό άκρο). Κάμπτει
όλα τα κλινικά σύρματα.
Code 139WG, KP-030-130-PMK



Πένσα διαμόρφωσης/κάμψης σύρματος τύπου
Adams που κάμπτει σύρμα μέχρι 0,5mm. Με
δύο πυραμιδικά άκρα.
Code ADAMS



Πένσα διαμόρφωσης/κάμψης σύρματος τύπου Angle
που κάμπτει σύρμα μέχρι 0,5mm. Με δύο κωνικά άκρα.
Code ANGRR, KP-045-125-PMK



Πένσα διαμόρφωσης γλωσσικών & υπερώϊων
τόξων. Με ειδικές υποδοχές για τελεία
κατασκευή του μέρους που μπαίνει στο sheath.
Code LING, KO-058-125-PMK

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ



Πένσα διαμόρφωσης σύρματος τύπου Delarosa.
Διαμορφώνει άμογες καμπύλες σε όλα τα κλινικά
σύρματα.
Αριστερά η κλασική. Code DLR, KP-012-125-PMK
Δεξιά με τρεις υποδοχές για παραλληλόγραμμα
σύρματα χωρίς torque.
Code DLR3, KP-112-125-HPMK



Τριπλή πένσα διαμόρφωσης/κάμψης σύρματος
Τύπου 139-Delarosa-Κόφτης. Στο πάνω μέρος έχει
υποδοχές σύρματος (με ένα πυραμιδικό και ένα
κωνικό άκρο). Στην μέση είναι μία κανονική πένσα
διαμόρφωσης Delarosa και πιο χαμηλά ένας κοφτης
για όλα τα κλινικά σύρματα.
Code 139 DLRC, KP-017-135-PMK



Πένσα κάμψης σύρματος και δημιουργίας torque
σε κλινικά σύρματα τύπου Tweed. Σε δύο τύπους
Απλή Code TWEED, KP-403-125-PMK
Ενισχυμένη με TC Code TWEEDTC, KP-903-
125-PZMK

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

NEW



Πένσες κάμψης σύρματος και δημιουργίας torque σε ένα δόντι. Διαμορφώνετε ανεξάρτητα σε κάθε δόντι το torque που επιθυμείτε χωρίς να επηρεαστούν τα γειτονικά δόντια. Χρησιμοποιούνται ως ζεύγος. Αριστερά KO-914-125-HPZMK Δεξιά KO-915-125-PZMK



Separating plier
Υψηλής ποιότητας πένσα τοποθέτησης ελαστικών διαχωρισμού.
Code SEP, SP-109-155-HPS



Πίστρο Merston
Το κλασικό πίστρο δακτύλων. Code MER, SP-756-140-PT



Εργαστηριακή πένσα τύπου Nance. Ιδανική για κάμψεις των αγκυλών του προστομιακού τόξου αλλά και άλλων.
Code NANCE, KP-048-135-PMS



Τρικελής πένσα μικρή για σύρμα μέχρι και 0,7mm.
Code TRPS, KP-214-120-PT



Τρικελής πένσα μεσαία για σύρμα μέχρι και 0,7mm.
Code TRPM, KP-114-120-PT



Τρικελής πένσα μεγάλη για σύρμα μέχρι και 1,0 mm.
Code TRPB, KP-054-125-PT

ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Τρικελής πένσα μικρή για κλινικά σύρματα μέχρι και 0,5mm. Code TRP, KP-068-115-HPMK



Πένσα Steps Για διαμόρφωση ισων σκαλοπατιών σε τέσσερα μεγέθη.
Code STEP, KP-008-130-PMK

Πένσα τύπου Kohler
Η πένσα κατασκευής τέλειων τριγωνικών αγκιστρών.
Code LKOHL, KP-330-125-PZMS



Πένσα YOUNG
Για διαμόρφωση σπειρών σε εργαστηριακά σύρματα.
Code YOUNG, KP-055-130-PT



Πένσα Universal Plier
Κόβει και κάμπτει όλα τα εργαστηριακά σύρματα μέχρι 1,1 mm.
Code LUNI, LP-094-150-PMK



Πένσα Universal Plier λεπτή
Κόβει και κάμπτει όλα τα εργαστηριακά σύρματα μέχρι 1,1 mm. Μοναδική λεπτή σχεδίαση.
Code LUNS, KP-100-160-PMK



Πένσα κατασκευής ελίκων (loop) Tweed σε κλινικά σύρματα με τρία σκαλοπάτια χωρίς χαραγές.
Code: TWEEDLS, KP-382-130-PMK




Πένσα κατασκευής ελίκων (loop) Tweed σε κλινικά σύρματα με τρία σκαλοπάτια και χαραγές για καλύτερη συγκράτηση του σύρματος.
Code TWEEDL, KP-083-135-PT

Πένσα κατασκευής ελίκων (loop) Tweed σε κλινικά σύρματα με τρία σκαλοπάτια και κόφτη.
Code LOOPC, KP-018-130-PMK

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΙΜΗ



Τρικελής πένσα εργαστηριακή. Κάμπτει σύρμα μέχρι 1,4mm. Ιδανική για εξωστοματικά.
Code TRPLAB, KP-149-130-PMK

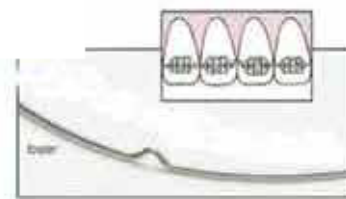

Πένσα SCHWARZ 1
Ιδανική για διαμόρφωση βελονοειδών απολήξεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημιουργία V-Bends σε σύρμα SS, TMA ακόμη και σε ΝΤΙ!
Code LSCHW1, KO-059-125-HPMK

Θ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΟΦΤΗΣ



Κόφτης εργαστηριακού σύρματος βαρέως τύπου για σύρμα μέχρι 1,5 mm.
Code LABWCM, OP-930-000-PZMK
Κόφτης εργαστηριακού σύρματος βαρέως τύπου για σύρμα μέχρι 2,5 mm
Code LABWCBL, OP-932-000-PZMK



Κόφτης εργαστηριακού σύρματος βαρέως τύπου για σύρμα μέχρι 2,2mm.
Code LABWCB, OP-931-000-PZMK (OP-110-170-PZMK)



Κόφτης εργαστηριακού σύρματος οικονομικός για σύρμα μέχρι 1mm.
Code LABWC & Laboratory Wire Cutter
Κόφτης αντοχής εργαστηριακού σύρματος με TC Inserts για σύρμα μέχρι 1mm.
Code LABWCTC, KP-940-000-PZMK



Πένσα SCHWARZ 2
Για την τελική διαμόρφωση του αγκίστρου Schwarz.
Code LSCHW2, KO-062-130-HPMK



Ευθεία πένσα Goslee Flat Plier
Οικονομική ευθεία πένσα κάμψεως εργαστηριακού σύρματος.
Code GOSL KP-046-140-PT



Ευθεία πένσα Flat Plier
Η κορυφαία ευθεία πένσα κάμψεως εργαστηριακού σύρματος με TC.
Code LFLATTC, KP-992-140-PT



Δυναμόμετρο.
Για μέτρηση της δύναμης, των διαγνωθικών ελαστικών ή και των ελατηρίων, που ασκείται στο δόντι. Με ειδικό πίνακα για ανάγνωση της δύναμης σε oz ή γραμμάρια.
Code Dynamometer



Στρογγυλό στάντ πενσών. Χωράει πολλές πένσες και ταυτόχρονα στο κέντρο ευθεία εργαλεία ενώ εξοικονομεί χώρο λόγω του σχημάτός του.
Code STAND



Το κλασικό στάντ πενσών. Μήκος 22 cm.
Code STANDO