



1 Στίλβωση της οδοντικής επιφάνειας, πλύση με νερό και στέγνωμα



2 Αδροποίηση με τον αδροποιητικό παράγοντα GC Ortho Etching Gel για 30sec
πλύση με νερό και καλό στέγνωμα της οδοντικής επιφάνειας. Για επιφάνειες από κεραμικό, μέταλλο ή ακρυλικό πρέπει να χρησιμοποιήσετε το κατάλληλο παράγοντα (βλ.σελ.)



3 Τοποθέτηση μικρής ποσότητας κόλλας στην βάση του bracket



4 Αφαίρεση περίσσειας όπου χρειάζεται



5 Φωτοπολυμερισμός του αγκίστρου εγγύς και άπω από 10sec

SCHOFFEL BRITTA & PARTNERS

Εισαγωγή – Εμπόριο οδοντιατρικών υλικών
Ολυμπιονικών 18, Πικέρμι 190 09
τηλ./fax: 210 9958 506 - 210 6043457
info@orthoshop.gr

GC Orthodontics
GLOBAL EXPERTS IN ORTHODONTICS


GC Orthodontics

GLOBAL EXPERTS IN ORTHODONTICS

GC Ortho **Connect**™

Λύση σε ένα βήμα

Μια μοναδική κόλλα για brackets χωρίς τη χρήση Primer.



www.orthoshop.gr

210 9958506




GC Ortho **Connect**™

- Ορθodontική φωτοπολυμεριζόμενη ακρυλική ρητίνη μιας φάσης για brackets και σωληνίσκους/tubes.
- Χωρίς χρήση συγκολλητικού παράγοντα, τοποθετείται αμέσως μετά την φάση της αδροποίησης.
- Kit με δύο σύριγγες των 2,9 γρ.

Transbond XT

Super Bond

GC Ortho Connect

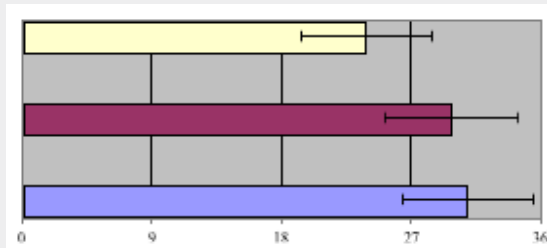


Metal Bracket

Transbond XT

Super Bond

GC Ortho Connect

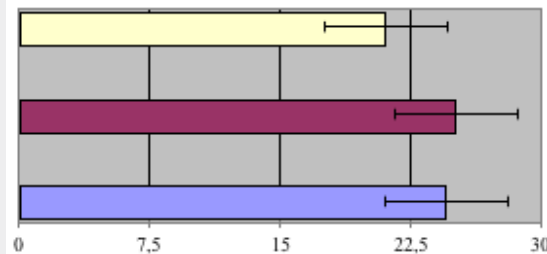


Ceramic Bracket

Transbond XT

Super Bond

GC Ortho Connect

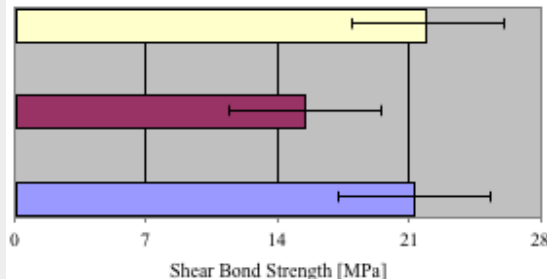

Plastic Bracket



GC Ortho **Connect**™

Λύση σε ένα βήμα. Με την GC Ortho Connect δεν χρειάζεται να εφαρμόσετε κάποιο primer ή συγκολλητικό παράγοντα πάνω στο δόντι, καθώς είναι ενσωματωμένο ήδη μέσα στην πάστα. Καλό καθαρισμό και αδροποίηση της αδαμαντίνης και στην συνέχεια πλύσιμο και στέγνωμα είναι αρκετό για άριστη συγκόλληση του αγκίστρου ή του παρειακού σωληνίσκου.

Ειδικά σχεδιασμένη εργονομική σύριγγα για τοποθέτηση μόνο του υλικού που χρειάζεστε. Σταματάει αυτόματα την ροή του υλικού αμέσως μόλις σταματήσει η πίεση λόγω της πατενταρισμένης της κατασκευής σε υποπίεση. Έτσι δεν έχει απώλεια υλικού και κάνετε μεγάλη οικονομία.

Το υλικό έχει φθοριζουσες ιδιότητες έτσι είναι εύκολο να δείτε κατά την αφαίρεση που υπάρχουν ακόμη υπολείμματα υλικού.

Επιπλέον οικονομία διότι δεν χρειάζεται να αντικαθιστάτε το άκρο της σύριγγας σε κάθε συγκόλληση αλλά απλώς να κλείνετε το καπάκι.

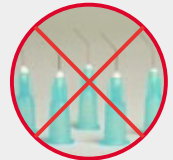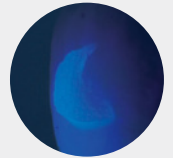

Contents	P/N
2 syringes of 2.9 g, 4 dispensing tips, 2 light protective covers	90-1100-0000